

InFlow

by Intake Health™

Guia Rápido




Fácil instalação



InFlow vem pronto para uso!

Use 4 suportes de segurança (incluídos) para cada infográfico e pendure acima dos mictórios.

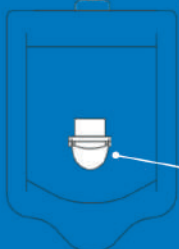

Instale o InFlow nos mictórios. Umedeça as ventosas e pressione firmemente para fixar, cerca de 15 cm acima do dreno.

Depois, é só usar

Direcione a urina para o InFlow. Mantenha o dispositivo cheio até aparecer o resultado de hidratação.

Otimize sua hidratação com resultados instantâneos

Compare o seu resultado com o infográfico para verificar os próximos passos e otimizar sua hidratação. O InFlow está pronto para a próxima medição após a drenagem. Não é necessário enxaguar.



VERDE
SÓLIDO

Ótimo



AMARELO
PULSANTE

Reabasteça




VERMELHO
PISCANDO

Reidrate-se



Luz azul cintilante? Bateria fraca, recarregue

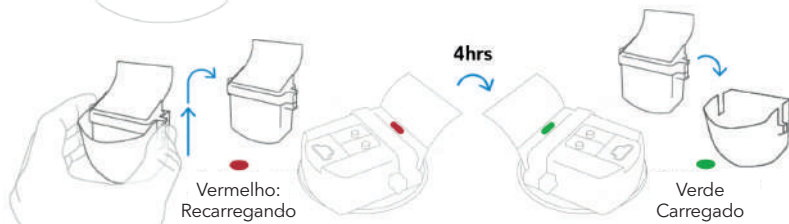

Usando luvas nas mãos, remova o cartucho Inflow, enxágue e coloque-o voltado para baixo no carregador.

Quando ficar verde, retorne o cartucho para o dispositivo.

Solução de problemas

Não está realizando medições - Certifique-se de que o InFlow esteja instalado verticalmente e que a urina está preenchendo completamente o copo. Também pode ser que o dispositivo precise ser recarregado.

Luz branca piscando - Indica um erro não recuperável, devido a uma queda, vazamento ou outra causa. Entre em contato com nosso suporte.

Durante o carregamento, pisca ou não acende - Indica uma conexão de carregamento sem fio ruim. Use apenas carregadores e adaptadores de parede da Intake Health. Retire o InFlow do carregador por 8 segundos. Tente novamente, ajustando levemente a posição do Inflow no carregador até obter uma iluminação sólida.

Manutenção

NÃO USE produtos de limpeza baseados em HCL no InFlow. Enxágue semanalmente com água. O InFlow pode ser pulverizado com produtos de limpeza sem HCL, se enxaguado imediatamente. Não use escovas de cerdas duras no dispositivo.

NÃO JOGUE FORA. As baterias de lítio podem ser perigosas e nunca devem ser colocadas no lixo ou jogadas fora. As baterias de lítio podem romper ou pegar fogo se danificadas. Entre em contato com nosso suporte para saber como descartar corretamente.

O InFlow não é um dispositivo médico. Não tem função de diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. O InFlow não deve ser usado para substituir exames ou consultas com um médico. O uso indevido de informações sobre hidratação pode causar problemas médicos graves, lesões e morte.

Conteúdo do kit:
- InFlow (4)
- Infográfico (4)
- Carregador (4)
- Adaptador do carregador (4)
- Guia rápido (1)
- Par de luvas (1)
- Suporte de segurança (16)

Precisa de ajuda?

assistencia@maxrecovery.com.br
(11) 98853-4392

