

Instrução de uso
Produto: Fita Adesiva

Indicação de uso: A fita adesiva é indicada para fornecer suporte e estabilidade para músculos e articulações durante os movimentos, sem limitar a amplitude dos mesmos e para reposicionar as estruturas encurtadas.

Instruções de uso: Localizar a região afetada, alongar o músculo, a pele deve estar limpa e depilada. (Recomenda-se passar um algodão com álcool antes). Esfregue o produto para ativar a cola. Coloque-o sobre a região afetada. O produto deve ser aplicado por profissional que tenha conhecimento da técnica pois o resultado do tratamento depende da correta aplicação, incluindo corte, posição, direção, área a ser estimulada e, principalmente, a tensão a ser colocada.

Contraindicações: O produto não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer material utilizado.

Advertências: Leia as instruções antes de utilizá-lo,
Se a dor permanecer ou surgirem erupções cutâneas interrompa o uso e procure um médico. O uso não é recomendado para pessoas com trombose.

Precauções: O produto não deve ser reprocessado,
O produto não deve ser aplicado sobre pele feridas, infeccionadas ou que apresentem lesões cutâneas.

Efeitos adversos: Não se aplica.

Armazenamento e transporte: Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e protegido da luz solar. Não transportar e nem armazenar em pé.

A Fita Adesiva não deve ser reprocessada. Prazo de validade: Indeterminado.

Fabricante: Mueller Sports Medicine

End: 1 Quench Drive, P.O. Box 99 Prairie du Sac, WI 53578 - Estados Unidos da América

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Carlos Muzzi 184- Palmeiras-Belo Horizonte.MG- cep: 30575-490

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990055