

## **Instruções de uso**

**Produto:** Fita Atletica M Tape

### **Indicação de uso:**

O produto é utilizado para a prevenção de lesões esportivas dos músculos, ligamentos e articulações;

### **Instruções de uso:**

Localizar a região afetada, alongar o músculo, a pele deve estar limpa e depilada. (Recomenda-se passar um algodão com álcool antes). Esfregue o produto para ativar a cola e o óxido de zinco que facilitará a aderência do produto à pele. Coloque-o sobre a região afetada. O produto deve ser aplicado por profissional que tenha conhecimento da técnica pois o resultado do tratamento depende da correta aplicação do mesmo, incluindo corte, posição, direção, área a ser estimulada e, principalmente, a tensão a ser colocada.

### **Contraindicações:**

O produto não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer material utilizado.

### **Advertências:**

Leia as instruções antes de utilizá-lo,

Se a dor permanecer ou surgirem erupções cutâneas interrompa o uso e procure um médico. O uso não é recomendado para pessoas com trombose.

**Precauções:** O produto não deve ser aplicado sobre pele ferida, infeccionada ou que apresente lesões cutâneas.

Se surgir erupção cutânea ou se a dor persistir, interrompa o uso e consulte um médico,

O produto não deve ser aplicado sobre pele feridas, infeccionadas ou com lesões cutâneas.

**Efeitos adversos:** Não se aplica.

**Armazenamento e transporte:** Deve ser armazenado em local seco, fresco, em temperatura ambiente e protegido da luz solar. Não armazenar em pé.

**Fabricante:** Mueller Sports Medicine

**End:** 1 Quench Drive, P.O. Box 99 Prairie du Sac, WI 53578 - Estados Unidos da América

**Importador:** QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Carlos Muzzi 184- Palmeiras-Belo Horizonte.MG- cep: 30575-490

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990052