

Instrução de uso
Produto: Fita Atletica Mtape

Indicação de uso:

O produto é utilizado para a prevenção de lesões esportivas dos músculos, ligamentos e articulações;

Instruções de uso:

Localizar a região afetada, alongar o músculo, a pele deve estar limpa e depilada. (Recomenda-se passar um algodão com álcool antes). Esfregue o produto para ativar a cola e o óxido de zinco que facilitará a aderência do produto à pele. Coloque-o sobre a região afetada. O produto deve ser aplicado por profissional que tenha conhecimento da técnica pois o resultado do tratamento depende da correta aplicação do mesmo, incluindo corte, posição, direção, área a ser estimulada e, principalmente, a tensão a ser colocada.

Contraindicações:

O produto não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer material utilizado.

Advertências:

Leia as instruções antes de utilizá-lo. O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso. Se a dor permanecer ou surgirem erupções cutâneas interrompa o uso e procure um médico. O uso não é recomendado para pessoas com trombose. O produto não deve ser reprocessado.

Precauções:

O produto não deve ser aplicado sobre pele ferida, infeccionada ou que apresente lesões cutâneas. Se surgir erupção cutânea ou se a dor persistir, interrompa o uso e consulte um médico,

O produto não deve ser aplicado sobre pele feridas, infeccionadas ou com lesões cutâneas.

Efeitos adversos: Não se aplica.

Armazenamento e transporte:

Deve ser armazenado e transportado em local seco, fresco, em temperatura ambiente e protegido da luz solar. O produto não deve ser armazenado em pé.

O produto não deve ser reprocessado. Prazo de validade: Indeterminado.

Fabricante: Mueller Sports Medicine

End: 1 Quench Drive, P.O. Box 99 Prairie du Sac, WI 53578 - Estados Unidos da América

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Carlos Muzzi 184- Palmeiras-Belo Horizonte.MG- cep: 30575-490

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990088