

Instrução de uso

Produto: Protetor Para Tornozelo Macio com Faixa

Indicação de uso: O produto é usado para ajudar a proporcionar proteção avançada para joelhos instáveis e com problemas crônicos, rótulas irritadas e instáveis, luxações do tendão patelar, alívio de dores pós-lesões e problemas moderados dos ligamentos. Ajuda também a proteger contra lesões ou reincidência de lesões.

Instruções de uso:

1. Afrouxar as faixas.
2. Deslizar a joelheira sobre a perna.
3. Alinhar a rótula acima do reforço.
4. Apertar as faixas superior e inferior.
5. Ajustar conforme necessário.

Contraindicações: O produto não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer material utilizado, inclusive aos materiais de revestimento. O produto não pode ser usado por pessoas alérgicas a borracha natural tipo látex.

Advertências: Não aplicável

Precauções: Este produto pode conter borracha látex natural passível de causar reacções alérgicas. Alguns produtos fabricados com material que contém neoprene podem causar irritação na pele. Se surgir uma erupção cutânea ou se a dor persistir, interrompa a utilização e consulte um médico

Efeitos adversos: Não aplicável

Armazenamento e transporte: Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e protegido da luz solar.

Prazo de validade: Indeterminado.

Fabricante: Mueller Sports Medicine

End: 1 Quench Drive, P.O. Box 99 Prairie du Sac, WI 53578 - Estados Unidos da América

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Carlos Muzzi 184- Palmeiras-Belo Horizonte.MG- cep: 30575-490

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990059