

Instrução de uso

Produto: Protetor Para Tornozelo XLP

Indicação de uso: O produto é usado para ajudar a proporcionar proteção avançada para joelhos instáveis e com problemas crônicos, rótulas irritadas e instáveis. Ajuda também a proteger contra lesões ou reincidência de lesões.

Instruções de uso:

1. Usar o protetor por cima da meia.
2. Puxar o protetor firmemente sobre o pé.
3. Apertar os velcros para que fique confortável e bem ajustado.
4. Voltar a apertar os velcros sempre que necessário para manter o suporte.

Contraindicações: O produto não deve ser usado em pacientes com hipersensibilidade conhecida a qualquer material utilizado, inclusive aos materiais de revestimento.

Advertências: Não aplicável

Precauções: Se surgir erupção cutânea ou se a dor persistir, interrompa a utilização e consulte um médico.

Efeitos adversos: Não aplicável

Armazenamento e transporte: Deve ser transportado e armazenado em temperatura ambiente, em local seco, fresco e protegido da luz solar.

Prazo de validade: Indeterminado.

Fabricante: Mueller Sports Medicine

End: 1 Quench Drive, P.O. Box 99 Prairie du Sac, WI 53578 - Estados Unidos da América

Importador: QR Consulting, Importação e Distribuição de Produtos Médicos Ltda

Rua Carlos Muzzi 184- Palmeiras-Belo Horizonte.MG- cep: 30575-490

Responsável técnica: Maria José Barbosa Duarte CRFMG: 10334

ANVISA: 81325990054